

Patientenservice für eine erfolgreiche Behandlung

electroCore hält für Patienten zahlreiche Dienstleistungen bereit, um sicherzustellen, dass gammaCore Ihnen bestmöglich helfen kann.

Unser Patientenversprechen

gammaCore Produktschulung und Service

Unser Schulungsservice unterstützt Sie beim Erlernen der korrekten Bedienung Ihres gammaCore und hilft Ihnen dabei, das Gerät richtig anzuwenden, damit Sie bestmögliche Ergebnisse erzielen können. Diese Dienstleistung ist kostenlos und steht jedem gammaCore-Anwender zur Verfügung. Persönliche Beratung kann bei Ihnen zu Hause, im Büro, in einem Webinar, über das Telefon oder, wenn Sie und Ihr behandelnder Arzt es wünschen, in der Praxis Ihres Arztes erfolgen.

gammaCore Produktinformationen

Über das Ressourcenzentrum für Patienten können Sie Gebrauchsanleitungen und Kopfschmerztagebücher herunterladen, sich Schulungsvideos ansehen und auf unser Produktschulungsportal zugreifen. Besuchen Sie uns dazu bitte auf www.gammacore.com.

Rückertstattung für Non-Responder

Ähnlich wie bei anderen Behandlungsoptionen, sprechen auch auf eine gammaCore-Therapie nicht alle Patienten an. Es ist deshalb wichtig, das gammaCore ausprobieren zu können. Bei den meisten Patienten tritt bei korrekter Anwendung des Gerätes in der Akutbehandlung nach 3 bis 5 Attacken und/oder, wenn gammaCore als vorbeugende Therapie eingesetzt wird, innerhalb von 4 bis 8 Wochen ein Ansprechen auf. Wenn Sie kein Ansprechen auf die Behandlung bemerken, leistet electroCore bei Rücksendung des Gerätes innerhalb von 45 Tagen, nachdem das gammaCore bei Ihnen eingetroffen ist, aus jedwedem Grund eine komplette Rückertstattung (nur gültig für das erste Gerät der ersten Bestellung und nach abgeschlossener Produktschulung; ein Gerät pro Kunde).³

Weitere Fragen? Bitte wenden Sie sich an:

Deutschland / EU *Tel.* +49 (0) 8171 414-300
Vereinigtes Königreich *Tel.* +44 (0) 1773 515034

E-mail customerservice@electrocorellc.com
Web www.gammacore.com

- 1 Daten archiviert
- 2 Daten aus tierexperimentellen Studien archiviert
- 3 Es gelten weitere Vertragsbedingungen:
Das Genehmigungsformular enthält ausführlichere Informationen.

electroCore LLC

electroCore LLC, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Elektro-zeutika, entwickelt Therapien, die zur Wiederherstellung einer normalen neurologischen Funktion unmittelbar und nichtinvasiv auf Ungleichgewichte von Nervensignalen wirken. electroCore ist ein in den USA ansässiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Entwicklung der nichtinvasiven Vagusnervstimulationstherapie (nVNS) zur Behandlung von verschiedenen neurologischen, psychiatrischen, gastroenterologischen und anderen Erkrankungen spezialisiert hat.



Hauptsitz (USA)

electroCore LLC *Tel.:* +1 973 290 0097
150 Allen Road, Suite 201 *Fax* +1 973 290 9171
Basking Ridge, NJ 07920 *E-Mail:* info@electrocorellc.com
USA

Europa

Deutschland / EU

Tel.: +49 (0) 8171 414-300
E-Mail: electrocore_de@distributioncenter.de

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 (0) 1773 515034
E-Mail: allogauk.electrocore@alloga.co.uk

electrocorellc.com

gammaCore ist derzeit nicht von der FDA zugelassen und nicht in den USA verfügbar. Die Produktverfügbarkeit vor Ort erfragen Sie bitte bei electroCore.

Diese Broschüre enthält Produktinformationen, die nicht von der FDA geprüft wurden. Die Produkte werden derzeit nicht in den USA vertrieben. Die Informationen in dieser Broschüre sind nicht länderspezifisch. Nicht alle Produkte oder Indikationen sind in allen Ländern innerhalb des globalen Marktes zugelassen. Wenden Sie sich an Ihren lokalen electroCore-Vertreter, um Informationen zu Ihrem Land zu erhalten.

Das gammaCore-Gerät ist für die nichtinvasive Vagusnervstimulation an der Seite des Halses bestimmt. gammaCore ist für die Behandlung und/oder Prävention von primären Kopfschmerzen (Migräne, Clusterkopfschmerzen und Hemicrania continua) und medikamenteninduziertem Kopfschmerz bei Erwachsenen indiziert. In Kanada ist das gammaCore-Gerät für die nichtinvasive Stimulation des Vagusnervs am Hals vorgesehen. gammaCore ist für die akute und/oder prophylaktische Behandlung von Clusterkopfschmerz und die Behandlung von Migräne bei Erwachsenen indiziert.

© 2015 electroCore LLC. Alle Rechte vorbehalten.

63000-00015 DE Rev 8



gammaCore®
Reset. Restore. Relieve.®



Nichtinvasive Vagusnervstimulation bei Migräne und Clusterkopfschmerzen

Häufig gestellte Fragen

gammacore.com

Was ist Vagusnervstimulation?

Bei der Vagusnervstimulation werden elektrische Signale an einen Nerv abgegeben, der Vagusnerv genannt wird und teilweise durch den Hals in das Gehirn zieht. Die implantierbare Vagusnervstimulation wird bereits seit vielen Jahren bei Tausenden von Patienten für die Behandlung unterschiedlicher Erkrankungen, darunter Epilepsie und Depressionen, angewendet.¹

Wie funktioniert diese Methode bei Migräne und Clusterkopfschmerzen?

Es ist noch nicht abschließend geklärt, auf welche Weise die Vagusnervstimulation Migräne und Clusterkopfschmerzen behandelt und verhindert. Die bisherigen Daten legen jedoch nahe, dass die Wirkung durch in das Gehirn gesendete Signale eintritt, welche die Menge einer Substanz verringern, die Glutamat genannt wird. Diese Substanz wurde mit Kopfschmerzsymptomen in Verbindung gebracht.²

Was ist gammaCore?

gammaCore ist ein nichtinvasives tragbares Gerät, das ein schwaches elektrisches Signal über die Haut an den Vagusnerv abgibt.

Was spricht für die Verwendung von gammaCore?

Bei der gammaCore-Therapie handelt es sich um eine sichere und wirksame nichtinvasive Behandlung von Migräne, Clusterkopfschmerzen und anderen Arten von Kopfschmerzen, ohne die Nebenwirkungen, die mit Medikamenten assoziiert sind. Das Gerät ist tragbar und einfach in der Anwendung. Die Behandlung kann problemlos in Ihren Tagesablauf integriert werden.

Schutzkappen

Stimulationsflächen



Anzeige

Tasten

Wie wird die Methode angewendet?

Die gammaCore-Therapie wird über ein tragbares Gerät verabreicht, das die Größe eines Mobiltelefons hat und ein spezifisches elektrisches Signal erzeugt. Auf die Stimulationsflächen des gammaCore wird ein leitendes Gel aufgetragen, bevor das Gerät am Hals platziert wird. Es dauert ungefähr 2 Minuten, eine einzelne Dosis zu verabreichen (möglicherweise ist mehr als eine Dosis pro Behandlung erforderlich). Detaillierte Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung des gammaCore finden sich in der Gebrauchsanweisung.

Was sind die möglichen Nebenwirkungen?

Es können während der Behandlung unter Umständen Heiserkeit, Kurzatmigkeit oder Stimmveränderungen auftreten. Ein kitzelndes/stechendes Gefühl am Applikationsort ist normal; es sollte jedoch keine größeren Beschwerden auslösen. Die Nebenwirkungen hören üblicherweise unmittelbar mit Beenden der Stimulation auf.

Wer darf das Gerät nicht verwenden?

gammaCore sollte nicht von Menschen verwendet werden, die implantierte Geräte wie beispielsweise Herzschrittmacher, Hörgerätimplantate oder andere elektronische implantierte Geräte tragen. Personen mit Arterienverengung (Arteriosklerose der Carotis) oder Personen, deren Vagusnerv im Halsbereich durchtrennt wurde, sollten es nicht benutzen. Ihr Arzt wird Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob die Behandlung die richtige für Sie ist. Für vollständige Informationen lesen Sie bitte die gammaCore-Gebrauchsanweisung.

Was kann ich von der Behandlung erwarten?

Die Behandlungsergebnisse sind von Person zu Person unterschiedlich. Es ist möglich, dass Sie eine unmittelbare Befreiung von Ihren Beschwerden erleben, wenn Sie gammaCore sofort bei den ersten Symptomen oder zu Beginn des Kopfschmerzes einsetzen. Wenn Sie das Gerät mehrmals am Tag zur Prophylaxe verwenden, können Sie eine Minderung der Intensität, der Dauer und der Häufigkeit von Kopfschmerzen feststellen. Es ist möglich, dass Sie unter der gammaCore-Therapie in der Lage sein werden, Ihre Kopfschmerzmedikamente zu reduzieren oder die Einnahme sogar ganz einzustellen. Ihr Arzt wird Ihnen helfen, die beste Therapie für Sie festzulegen.

Um herauszufinden, ob Sie auf die gammaCore-Therapie ansprechen, ist es wichtig, das gammaCore richtig anzuwenden. Bei den meisten Patienten tritt bei korrekter Anwendung des Gerätes in der Akutbehandlung nach 3 bis 5 Attacken und/oder, wenn gammaCore als vorbeugende Therapie eingesetzt wird, innerhalb von 4 bis 8 Wochen ein Ansprechen auf. Ein Anwendungstraining mit einem gammaCore-Berater, ein Gespräch mit Ihrem Arzt und das Führen eines Kopfschmerztagebuchs können Ihnen dabei helfen herauszufinden, ob Sie auf die Therapie ansprechen.

1



Zu behandelnde Stelle ermitteln

2



Gel auf die Stimulationsflächen auftragen

3



Gerät in Position bringen und mit der Behandlung beginnen

Wo erhalte ich weitere Informationen zu gammaCore?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt. Sie bestimmen gemeinsam mit Ihrem Arzt, ob die gammaCore-Therapie für die Behandlung Ihrer Kopfschmerzen in Frage kommt.

Wenn Sie Ihrem Arzt weitere Informationen zu gammaCore zur Verfügung stellen möchten, besuchen Sie uns bitte auf www.gammacore.com.

Wie kann ich ein gammaCore bestellen?

Wenn Sie ein Gerät bestellen möchten, muss ein Autorisierungsformular ausgefüllt und von Ihrem Arzt unterschrieben werden. Das Gerät wird direkt an Sie oder die Praxis Ihres Arztes versandt. Bitte besuchen Sie www.gammacore.com, um das Autorisierungsformular auszudrucken und nehmen Sie dieses Formular zu Ihrem nächsten Arzttermin mit. Sie können das unterzeichnete Autorisierungsformular per Fax, Post oder E-Mail an electroCore senden. Anschließend wird Ihre Bestellung bearbeitet.

Ist gammaCore eine Leistung der Krankenversicherung?

electroCore arbeitet weltweit mit den verschiedensten gesetzlichen und privaten Versicherern zusammen, um eine Erstattung des gammaCore sicherzustellen. In Deutschland ist die gammaCore-Therapie jedoch noch keine Regelleistung der Krankenkassen. Für weitere Informationen zur Kostenerstattung und Erstattungsanträgen wenden Sie sich an Ihren lokalen gammaCore-Vertreter oder den Kundendienst.

gammacore.com



Erfahren Sie mehr über gammaCore und den neuartigen Ansatz zur Behandlung von Migräne und Clusterkopfschmerzen. Lernmaterial und weitere wichtige Informationen finden Sie auf gammacore.com:

FAQs?

Antworten auf häufig gestellte Fragen und Verweise auf Quellen mit detaillierten Informationen über gammaCore.

1 2 3

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Verabreichung von gammaCore.



Zugang zu Kopfschmerztagebüchern, Videos und anderen Ressourcen ...